




一般医療機器

モイスキンシート™

孔開きポリウレタンを使用した
ロールタイプの被覆材



使用方法

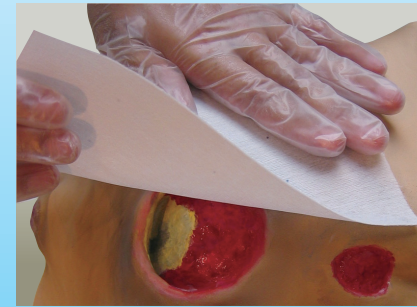

創部を十分に洗浄した後、創の大きさに合わせたシートを使用して下さい。
(創よりひと回り大きめでご使用下さい。)



表裏に十分ご注意ください(青点側が上)、
サージカルテープなどで固定して下さい。



滲出液の量に応じてセカンドドレッシング
で調節します。セカンドドレッシング
側に貼ってから使用する事もできます。

交換の目安



創の確認の際、シートに汚れが見られ
たら交換して下さい。

廃棄方法



使用後の芯を外し、箱の中の左右の★部分を持ち上げて下さい。
簡単に分解する事ができ、つぶして廃棄する事が可能です。
(芯、化粧箱とも紙製です)

幅×長さ	10cm×5m	15cm×5m	30cm×5m
商品 イメージ	 8折ガーゼよりひと回り大きめの幅	 4折ガーゼとほぼ同じ幅	 尺角ガーゼとほぼ同じ幅

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	JANコード	ITFコード
モイスキンシート 10cm×5m 1巻入	単品 58×119× 57	72g	オープン 価格	30		梱 14987603190907
	梱 200×315×260	2.51kg				
モイスキンシート 15cm×5m 1巻入	単品 58×169× 57	104g	オープン 価格	30		梱 14987603190914
	梱 200×360×315	3.55kg				
モイスキンシート 30cm×5m 1巻入	単品 58×319× 57	199g	オープン 価格	15		梱 14987603190921
	梱 200×335×325	3.42kg				

販売名：モイスキンシート

届出番号：13B2X00023000154

●お問い合わせは

 **白十字株式会社**
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

BM-07