

折りたためる首サポーター

# ネックラック®



Taketora®



▲商品詳細  
はこちら

## 巻くと首がラクになる

- 軽量で通気性も良く、首をラクにサポート
- ムレにくい、抗菌・消臭のウレタン素材
- 小さくたためて持ち運びもラクラク！



【正しい姿勢】



■ 面ファスナーで簡単装着



■ 汚れが目立ちにくく、スポーティーなブラック

■ 手のひらサイズに折りたたためて便利



■ 10個のウレタンを生地でつないでいるため、折りたたためて通気性も良い



■ 軽量（約100g）

固定用ゴムバンド



※折りたたんで収納する際には、固定用ゴムバンドで留めてください。

## 素 材

ポリウレタン・ナイロン ※洗濯可（手洗い）

## 規 格

定価：オープン

| 商品番号   | 規 格 | 適応首廻り     | 販売単位 | JAN CODE      | ケース単位 |
|--------|-----|-----------|------|---------------|-------|
| 035162 | S-M | 30cm～38cm | 1枚   | 4958995351620 | 12枚   |
| 035163 | M-L | 38cm～46cm | 1枚   | 4958995351637 | 12枚   |

※首廻り 38cmの方はM-Lをおすすめします



サイズの選び方

計測部位目安



首廻り

## 装着方法

開いた状態（外側）

【上：あご側】

※くぼみ


高さ

8.5cm



【下：鎖骨側】

面ファスナー

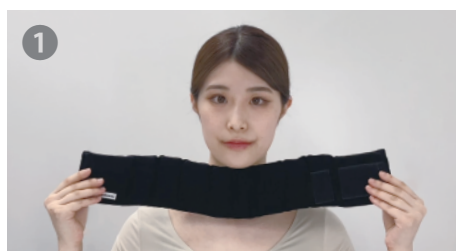

1



2



サイズタグの「うえ↑↑」を確認してください  
(サイズタグがある面が内側になります)。  
中央部のくぼみが、首の前側中心にくるよう  
に当てます。

前側から首に巻き、首後ろで面ファスナー  
を留めてください。

装着の際は、指が1～2本入る程度の隙間  
をあけ、首を締めすぎないようにご注意ください。



## 日常のこんなシーンに


・長時間うつむき姿勢になるときに



リモート授業



在宅ワーク

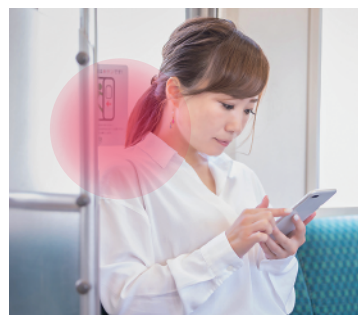

通勤



eスポーツ



読書



家事

## 装着イメージ



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F  
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F  
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店